

## INSTRUCTIVO DE TOMA DE MUESTRAS DE PLUMAS PARA SEXAGE POR ADN

***Si no tiene experiencia, le recomendamos que las plumas sean colectadas por un veterinario ó por personal con experiencia. Esta recomendación es para evitar un posible daño al ave y por su propia seguridad.***

Las plumas para el análisis de ADN deben tener como máximo una semana de haber sido colectadas. No incluir plumas que hayan mudado naturalmente. El ADN se encuentra en la base de la pluma, que se origina sólo por debajo de la superficie de la piel. En caso de aves pequeñas, se recomienda usar pinzas para colectar las plumas.

Antes de tomar las muestras de las plumas, asegúrese de que sus manos estén limpias. Si usted está recolectando muestras de varias aves, lavarse y secarse bien las manos entre cada colección. Evite tocar los extremos del eje o cálamo de las plumas (ver figura).

Siga los siguientes pasos para asegurar una adecuada colecta de plumas para la prueba de ADN.

### 1. Rotular cada etiqueta del sobre

Antes de iniciar la colecta, usted debe etiquetar cada sobre con el nombre o identificación del ave colectada (nombre del ave, número de banda, o jaula). Utilice la misma identificación del ave en la Orden de Servicio que tiene a continuación.

### 2. Arrancar las plumas del pecho

Teniendo al ave adecuadamente inmovilizada, proceda a arrancar 4-5 plumas del pecho.

### 3. Coloque las plumas en el sobre etiquetado

Coloque las plumas en el sobre que se etiquetó en el paso 1. Evite tocar los extremos del eje o cálamo de las plumas. Cada sobre debe contener las plumas de un solo individuo.

### 4. Envío de las Muestras

Llene la Orden de Servicio por ADN con la identificación las aves que serán sexadas. Coloque los sobres que contienen las muestras debidamente etiquetadas junto con la Orden de Servicio dentro de un sobre y envíelo por correo a la siguiente dirección:

Av. Javier Prado Oeste 844  
Magdalena Lima 17  
Lima-PERU



### Tarifario

N° de individuos	Costo por individuo (Dólares)	Costo por individuo (Euros)
de 01 a 10	12.00	9.00
de 11 a 20	10.00	8.00
de 21 a 30	9.00	7.00
más de 30	8.00	6.00

Le recordamos que gustosamente atenderemos sus consultas por personal calificado totalmente gratis

Contacto: Blgo. Martin Gavilan  
E-mail: mgavilan@biolinksperu.com / gavilanmgd@yahoo.com



## ORDEN DE SERVICIO DE SEXADO POR ADN

Nombre: \_\_\_\_\_  
 Empresa: \_\_\_\_\_  
 Dirección: \_\_\_\_\_  
 Teléfono: \_\_\_\_\_  
 E-mail: \_\_\_\_\_

N°	Especie (nombre científico)	Identificación (Nombre del Ave)	A ser llenado por el investigador
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

El depósito bancario corresponde a:

	dólares	euros
--	---------	-------

El pago deberá hacerse a:

**Banco BBVA Banco Continental Cta. Cte. en soles: 0011-0357-0100009503**  
 Código Interbancario SWIFT: BCONPEPL

**Banco de Crédito del Perú Cta. Cte. en soles: 193-1742158-054**  
 Código Interbancario SWIFT: BCPLPEPL

NOTA: No olvide enviar el voucher de pago vía E-mail ó adjunte el recibo con las muestras a ser analizadas.

