

SET DE ADN EN CASA

Una vez efectuado el pago de la cuota inicial y enviado el voucher a este correo electrónico adn@biolinksperu.com le enviaremos el set de toma de muestras sin ningún costo a la dirección o casilla postal que usted indique. Este Set de ADN llegará dentro de un sobre cerrado con su nombre. Si usted lo cree conveniente puede recoger dicho set en nuestro laboratorio, en nuestras sucursales y/o representantes.

El procedimiento es muy sencillo y podrá obtener sus resultados tan certeros como si se los hubiera tomado en nuestro laboratorio.

Es preciso mencionar que los resultados se referirán a códigos y no a nombre de personas, dado que ningún representante del laboratorio podrá acreditar la identidad de los donantes al no haber participado directamente de la toma de muestras biológicas.

Recomendamos que identifiquen a las muestras biológicas con los códigos consignados en el Set de ADN. En caso que el cliente codifique las muestras sugerimos que usen números y/o letras sin nombres ni apellidos. Únicamente, la(s) persona(s) que tomo o tomaron las muestras conocerá(n) la identidad de los donantes.

Al recibir su **Set de ADN** en Casa revise que contenga lo siguiente:

- Una tarjeta de color rojo conteniendo una contraseña
- Tres sobres con su respectivo porta hisopos, donde se colocaran las muestras, el celeste corresponde al **presunto padre**, el rosado a la **madre** y el **blanco** al niño/a
- Tres sobres conteniendo 2 pares de hisopos.



INSTRUCCIONES DE USO DEL SET DE ADN

Recuerde poner su contraseña en los sobres para luego solicitar sus resultados de manera confidencial. Guarde su código.



Luego proceda a:

1. Enjuagarse la boca con agua antes de coleccionar las muestras bucales. Para los bebes lactantes, se debe esperar al menos 1 hora después de tomar su leche.


2. Abra el paquete y tome uno de los dos hisopos.



3. Frote el hisopo de manera horizontal y vertical contra la cara interna de la mejilla haciendo girar el hisopo contra el interior de ambas mejilla por un mínimo de 30 segundos. Puede usar un hisopo por cada mejilla.



4. ¡Guarde cuidadosamente el hisopo en el porta hisopos. Cuide la cabeza de los hisopos con las manos, ni de rozar excesivamente las paredes del sobre para evitar perder células con ADN.

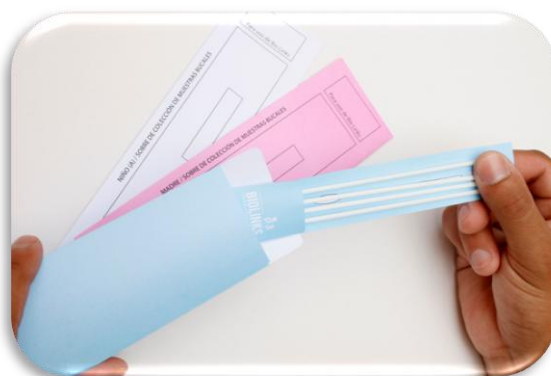

5. Una vez terminada la colección de muestras cierre el sobre que contiene los dos hisopos.
6. Repita el mismo proceso de colección de las muestras con el resto de participantes. Recuerde que cada participante lleva un color diferente uno del otro.

7. Finalmente, coloque los tres sobres de colores en el interior del sobre membretado y envíelos a Laboratorios BIOLINKS. En caso no sea posible enviarlo inmediatamente, manténgalo congelado hasta su envío como máximo 15 días.



Si no sigues las instrucciones debidamente se requerirá de una nueva colecta de muestras. Para ello se le enviará sin costo adicional un segundo set de toma de muestras. Esta prueba necesita coleccionar células que forman parte de la mejilla interna. ¡NO SE TRATA DE COLECTAR SALIVA!

Envío de las Muestras Bucales

- Usted puede entregarlo por correo postal o de manera personal visitándonos en nuestro laboratorio en Lima o en las sucursales de Arequipa, Huancayo y Trujillo.
- Envíe las muestras y adjunte una copia del comprobante de pago, así como la documentación requerida e indicando el número de la contraseña a:

Laboratorios BIOLINKS

Av. Javier Prado Oeste N° 844, Magdalena

Lima 17